


コロナ/インフルエンザ抗原 コンボ検査ペン

迅速かつ利便性の高いイムノクロマトグラフ法で
COVID-19/インフルエンザ A型・B型抗原を検出します

【企業様用販売価格】

1キット ¥2,800 (税抜) ¥3,080 (税込)

※注文単位20キット = ¥61,600 (税込)

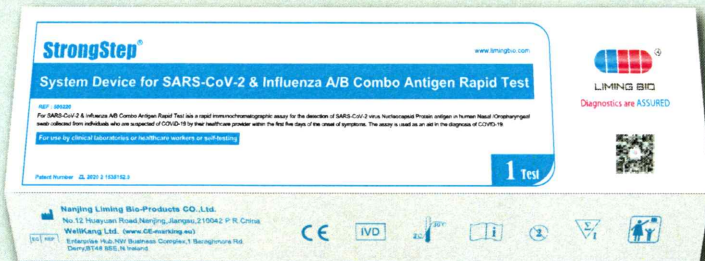

LIMING BIO 社 (中国) は、中国大手医療メーカーの一つで、弊社が直接輸入している検査キットです。

抗原を調べる

鼻孔・中咽頭分泌物で検査 約15分でわかる

簡単 手軽

3種の抗原を検出


CE認証取得

コロナウイルス	インフルエンザA型	インフルエンザB型
※臨床特異度 97.26%	※臨床特異度 96.48%	※臨床特異度 98.71%
※臨床感度 92.31%	※臨床感度 80.56%	※臨床感度 73.91%
※正確度 94.79%	※正確度 88.52%	※正確度 86.31%


付属している長い綿棒で、鼻孔・中咽頭の分泌物を付属の容器に取り込み、試験キットに垂らして検査する簡単な試験キットです。当商品は研究用試薬です。

① 鼻孔分泌物の採集 【Nasal swab】綿棒を使用


鼻孔に綿棒を慎重に2.5 cmくらいまで挿入し、鼻壁に対して約5回転がして分泌物を採取します。続けて反対側も同様に採集してください。

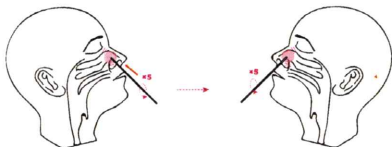

採集した綿棒の先端を抽出チューブに入れて折り離して落とします。

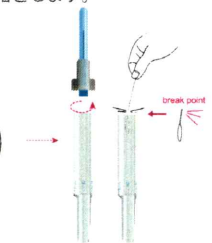


③ 青キャップをつぶして検査液を全て落とし、よくかき混ぜてから逆さまにしてください。15分ほどで結果がでます

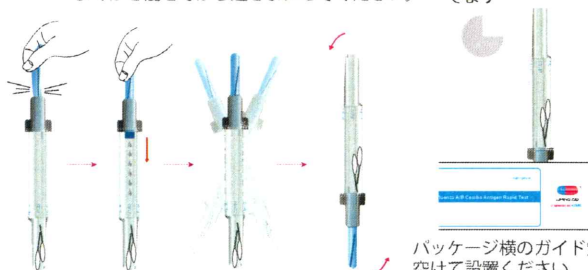



パッケージ横のガイド穴を空けて設置ください

② 口腔内分泌物の採集 【Oropharyngeal swab】綿棒を使用

次に別の綿棒を使用し口腔内左右2か所から分泌物を採集してください。

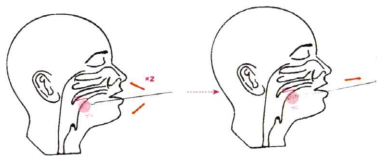

同様に採集した綿棒の先端を抽出チューブに入れて折り離して落とし、キャップを閉めてください。

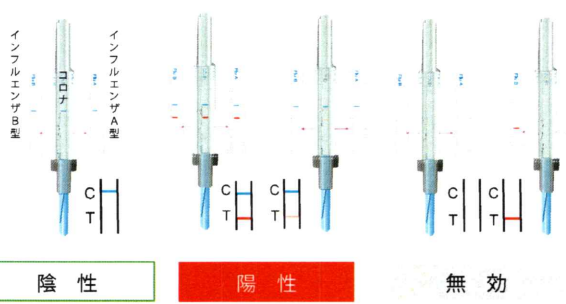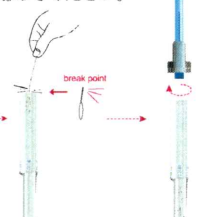

陰性

陽性

無効

■保管条件と有効期限

- 室温 (2℃~30℃) 保管可能ですが、冷蔵庫などの冷暗所 (2℃~15℃) で保管いただくよう推奨いたします。また、長期保存の際はチャック付き袋で密閉状態にて保管して下さい。
- 本検査キットの内容物は開封後、室温下で1時間以内にご使用ください。生産日から24ヶ月が本検査キットの有効期限となります。適切な条件で保管されていても、有効期限が切れたキットは使用しないでください。
- 凍結しないでください。
- 破損等が確認されるキットは使用しないでください。

■重要事項

本製品の陰性結果は、SARS-COV-2/インフルエンザに感染している可能性を否定するものではありません。検査キットの判定結果は、治療及び、診断目的に使用はできません。

※本製品は研究試薬です。

※本製品は清潔な環境で正確・速やかに検査することが重要です。

※本製品の使用により発生した損害および損失について弊社は一切の責任を負いません。

型番	JAN

●販売単位：
1カートン
(20キット入り)