



コロナ/インフルエンザ抗原検査キット

【企業様用販売価格】

迅速かつ利便性の高いラテラルクロマトグラフ法でCOVID-19/インフルエンザA型・B型抗原を検出します

1キット ¥2,800(税抜) ¥3,080(税込)
※注文単位25キット=¥77,000(税込)



抗原を調べる

鼻孔分泌物で検査

約15分でわかる

簡単・手軽

3種の抗原を検出

CE認証取得

コロナウイルス

※臨床特異度 97.69%
※臨床感度 91.67%
※正確度 94.68%


インフルエンザA型

※臨床特異度 99.20%
※臨床感度 93.33%
※正確度 96.27%


インフルエンザB型

※臨床特異度 98.18%
※臨床感度 91.11%
※正確度 94.65%

付属している長い綿棒で、鼻孔の分泌物を付属の容器に取り込み、試験キットに垂らして検査する簡単な試験キットです。当商品は研究用試薬です。

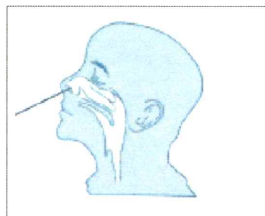

鼻孔に綿棒を慎重に挿入し、鼻壁に対して綿棒を約5回転がして分泌物を採取します。

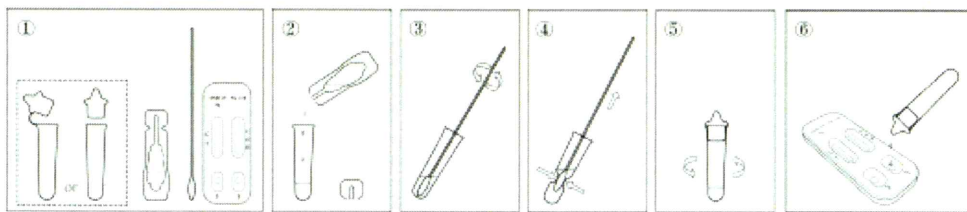

キットが全て揃っているか確認する。
・テストカートリッジ
・分泌物採集用スワブ(綿棒)
・採集容器/展開液

展開液を12滴ほど採取した綿棒を採集容器に垂らし、10秒かき混ぜる


綿棒を数回絞り容器に押し付けながらゆっくりと引き抜く

容器にキャップをして静かに振って、内部の液体をよく混合します

検体液をカートリッジの2つのテストホールにそれぞれ3滴(約70~90μL)入れます。約15分後に結果が出ます。

※イラストはイメージです。実際のキット仕様と違う場合がございます。

コロナウイルス検査結果

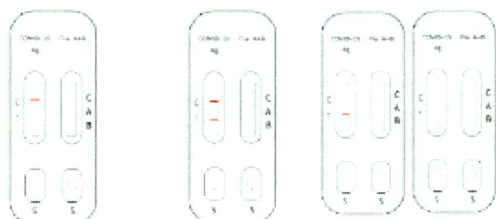


陰性

陽性

無効

インフルエンザウイルス検査結果

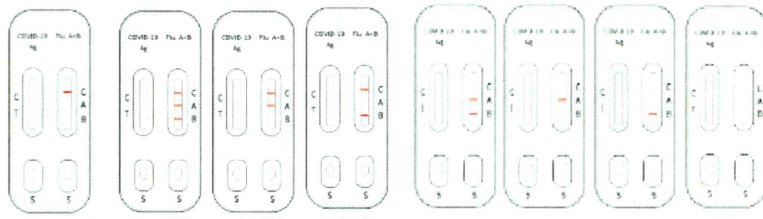

陰性

陽性

無効

■保管条件と有効期限

- 室温(2℃~30℃)保管可能ですが、冷蔵庫などの冷暗所(2℃~15℃)で保管いただくよう推奨いたします。また、長期保存の際はチャック付き袋で密閉状態にて保管して下さい。
- 本検査キットの内容物は開封後、室温下で1時間以内にご使用ください。生産日から18ヶ月が本検査キットの有効期限となります。適切な条件で保管されていても、有効期限が切れたキットは使用しないでください。
- 凍結しないでください。
- 破損等が確認されるキットは使用しないでください。

■重要事項

本製品の陰性結果は、SARS-COV-2/インフルエンザに感染している可能性を否定するものではありません。検査キットの判定結果は、治療及び、診断目的に使用はできません。

※本製品は研究試薬です。
※本製品は清潔な環境で正確・速やかに検査することが重要です。
※本製品の使用により発生した損害および損失について弊社は一切の責任を負いません。

型番	JAN
ABHGD-CMB	4571586291282
ABHGD-CMB-25	4571586291299

●販売単位:
1カートン
(25キット入り)